



Guida di riferimento per

NanoClave™

Connettore senza ago Neutral Displacement a basso profilo



Disinfezione e protezione

- › Prima di posizionare un nuovo NanoClave su un catetere, disinfettare il raccordo del catetere ed eseguire il priming di NanoClave.
- › Prima di accedere a un NanoClave, disinfettare secondo le Istruzioni per l'uso* o il protocollo della struttura.



Somministrazione o aspirazione

- › Collegare il tubo per infusione endovenosa, la siringa o il supporto per provette a NanoClave inserendo il luer e ruotando fino a ottenere un serraggio per attrito.
- › Non serrare eccessivamente il luer oltre tale limite perché sia il luer che NanoClave potrebbero esserne danneggiati.



Lavaggio ad ogni uso

- › Lavare NanoClave con normale soluzione salina o in base al protocollo della struttura. Dopo ogni uso NanoClave può essere lavato e non è necessario sostituirlo.
- › Eseguire un lavaggio di routine in conformità al protocollo della struttura per preservare la pervietà del catetere.
- › Sostituire NanoClave in conformità al protocollo della struttura e alle linee guida CDC.



Il lavaggio opzionale con soluzione salina di NanoClave è concepito per contribuire a ridurre il rischio di trombocitopenia indotta da eparina (TIE).

*Disinfettare secondo le Istruzioni per l'uso ICU Medical NanoClave = disinfettare con una salvietta di alcool isopropilico al 70% con un movimento circolare aggressivo per 3 secondi e lasciare asciugare.

Il prodotto è conforme alla normativa vigente e presenta la corrispondente marcatura CE. Per ulteriori informazioni, avvertenze e/o precauzioni di sicurezza, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso del produttore.