



# Guida di riferimento per il collettore NanoClave™

Sistema di infusione multi-porta



## Disinfezione e protezione

- › Prima di posizionare un nuovo NanoClave su un catetere, disinfettare il raccordo del catetere ed eseguire il priming di NanoClave.
- › Prima di accedere a NanoClave disinfettare sempre il sito di iniezione con l'antisettico approvato dal protocollo della struttura.
- › Pulire il sito di iniezione rispettando modalità e tempi di asciugatura indicati dal protocollo della struttura.



## Somministrazione o aspirazione

- › Collegare il tubo per infusione endovenosa, la siringa o il supporto per provette a NanoClave inserendo il luer e ruotando fino a ottenere un serraggio per attrito.
- › Non serrare eccessivamente il luer oltre tale limite perché sia il luer che NanoClave potrebbero esserne danneggiati.



## Lavaggio ad ogni uso

- › Lavare NanoClave con normale soluzione salina o in base al protocollo della struttura. Dopo ogni uso NanoClave può essere lavato e non è necessario sostituirlo.
- › Eseguire un lavaggio di routine in conformità al protocollo della struttura per preservare la pervietà del catetere.
- › Sostituire NanoClave in conformità al protocollo della struttura e alle linee guida CDC.



Il lavaggio opzionale con soluzione salina di NanoClave è concepito per contribuire a ridurre il rischio di trombocitopenia indotta da eparina (TIE).

Il prodotto è conforme alla normativa vigente e presenta la corrispondente marcatura CE. Per ulteriori informazioni, avvertenze e/o precauzioni di sicurezza, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso del produttore.

**icumedical**  
connessioni umane